

スピリーバ®レスピマツト®/スピオルト®レスピマツト®を服薬されている患者様へ

# スピリーバ®レスピマツト®/スピオルト®レスピマツト®の吸入方法

※7日間使用しなかった場合は、下に向けて1回噴霧した後に使用してください。

## 吸入方法 01 回す



- 1 キャップを閉じた状態で上向きに持ちます。
- 2 カチッと音がするまで本体下部を180度回転させます。

## 吸入方法 02 開ける



- 3 横の小さな突起からキャップを開けます。
- 4 息をゆっくり最後まで吐き出します。

## 吸入方法 03 ゆっくり吸う



- 5 通気孔をふさがないように気をつけながら、マウスピースをしっかりとくわえます。
- 6 口からゆっくりと息を吸いながら噴霧ボタンを押します。
- 7 ご自身の呼吸に合わせてゆっくりと吸い込みます。
- 8 マウスピースを口から外して、苦しくない程度に、息を止めます。
- 9 息をゆっくりと吐き出して、キャップを閉じます。

## 吸入方法 01-03 を1日1回、2吸入で完了です!

レスピマツト®の使い方動画は検索や二次元コードからご覧いただけます。[ 60秒 ]

[https://www.copd-jp.com/howto\\_respimat/](https://www.copd-jp.com/howto_respimat/)



COPD-jp レスピマツトの使い方

検索




# 新しいレスピマツ®を使用開始する場合は、以下の準備をしてからご使用ください

※初めて使用する場合、または21日間使用しなかった場合、「吸入準備」の操作が必要になります。

## 使用前準備 01 組み立て



- 1 キャップを閉じた状態で安全止めを押しながら、透明ケースを外します。
- 2 カートリッジをまっすぐ挿入します。その際、カートリッジ上部のシールを突き破るので、抵抗感を感じます。
- 3 テーブルなどの平らなところに置き、ガチャと音がするまで奥に挿入します。

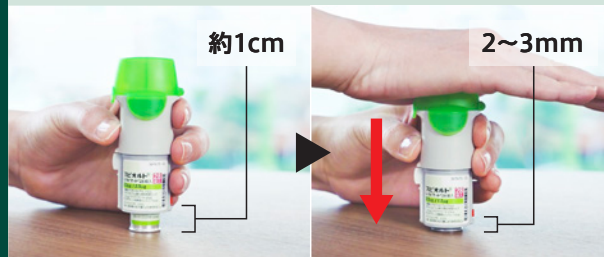

- 4 透明ケースを装着します。

## 使用前準備 02 吸入準備



- 5 キャップを閉じた状態で上向きに持ち、カチッと音がするまで本体下部を180度回転させます。
- 6 横の小さな突起からキャップを開け、下に向けて噴霧ボタンを押します。※薬剤が目に入らないよう注意してください。
- 7 キャップを閉じます。

7日間以上使用しなかった場合は、下に向けて1回噴霧した後に使用してください。

21日間以上使用しなかった場合は、ミストが見えるまで5、6の操作を行った後、さらに3回操作を繰り返してください。

レスピマツ®の組み立てと吸入準備の動画は検索や二次元コードからご覧いただけます。

[https://www.copd-jp.com/howto\\_respimat/](https://www.copd-jp.com/howto_respimat/)



COPD-jp レスピマツの使い方



使用前準備 02 の操作で薬剤の噴霧が確認できたら、さらに  
使用前準備 02 の操作を3回繰り返して吸入準備の完了です。

表面の吸入方法へ

複数本のレスピマツ®を処方された場合には、2本目以降の使用開始時に、必ず吸入準備をしてください。



※テスト噴霧は、吸入可能な回数には含まれません。準備完了後60吸入で30日(60噴霧)、28吸入では14日(28噴霧)の吸入が可能です。